

Enjeksiyon Talimatı


ÖNCE




1 Ellerinizi su ve sabunla yıkayın




2 Rahat bir pozisyonda oturun

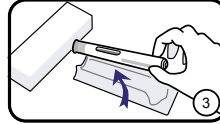


3 Kalemı ambalajdan çıkarın ve beyaz alanla yeşil kapak arasındaki mührün sağlam olup olmadığını bakın

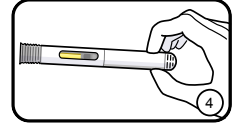

4 Her seferinde farklı bir enjeksiyon yeri seçin (arka sayfaya bakın)

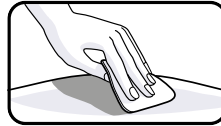


5 Enjeksiyon yerini alkolü bir bezle temizleyin

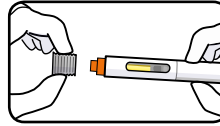

6 Kapağı temizleyin




7 Hafifçe sıkıştırıp tutarak cildinizde bir kıvrım oluşturun

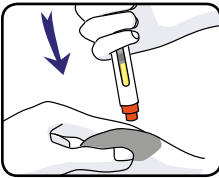

8 Turuncu iğne korumasını enjeksiyon yerine dayayın



9 Enjeksiyona başlamak üzere, kalemı bir klik sesi duyup hissedene kadar aşağı doğru cildinizin üzerine bastırın

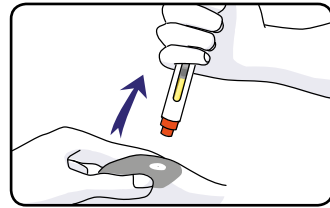

10 Enjeksiyon 2. klikten sonra tamamlanmıştır. Kalemı 2 – 3 saniye sonra cildinizden çıkarın ve cilt kıvrımını bırakın

SONRA

11 Kullandıktan sonra kalemı kontrol edin. Enjeksiyondan sonra pencere yeşil görünmeli. Bu bütün sıvının enjekte edildiği anlamına gelir

12 Kullanılmış kalemı çöp kutusuna atın

İlacı haftada bir uygulayın

